


新発売

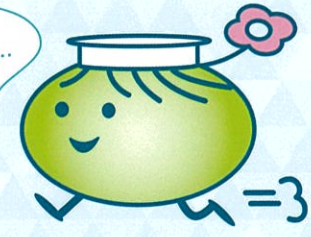

ひえ子は  
使い方もいろいろ...



# ISKひえ子 & ひえ子カバー


実物大



10.5cm

10.5cm

小さな冷却材が  
欲しかったのよ...に、  
お答えしました!

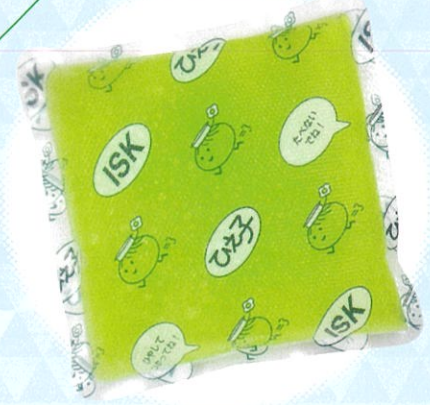

冷凍庫で冷やすと、  
このように白っぽくなります。

## 使 い 方 い ろ い ろ ...

ひえ子カバーをそのまま...  
ひえ子を2個使って...




ひえ子カバーを真ん中で切って...  
ひえ子を1個使って...






## ひえ子カバー

内側が防水ラミを使用。ひえ子からの結露を防ぎます。

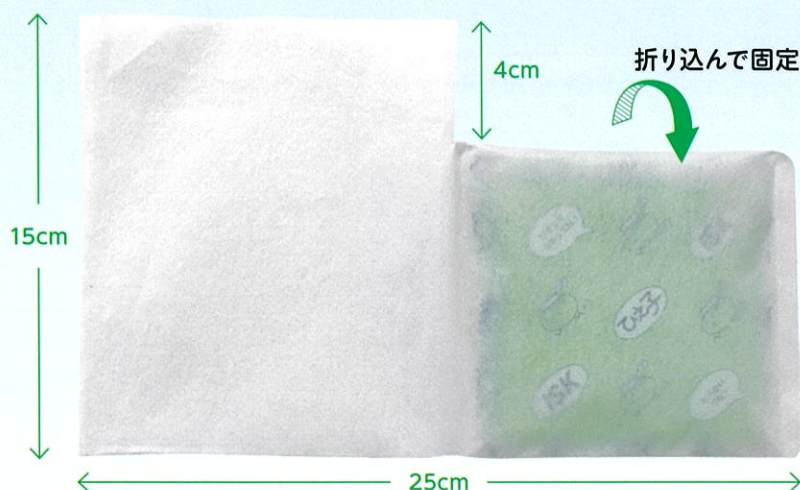

## 使い易さを重視!

ひえ子カバーの箱は使いたい時にすぐに使えるように、冷蔵庫に磁石のフックを取り付け吊り下げておきます。

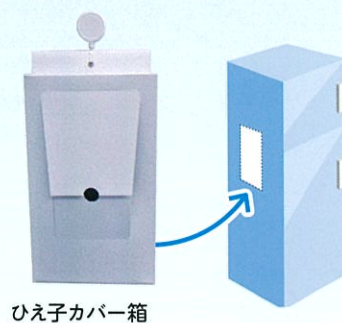

## 特長

- ひえ子
  - ・シャーベットゲルは凍らずに、ソフトな使用感があります。
  - ・繰り返しの使用が可能です。(破損した場合、使用は出来ません)
  - ・コンパクトなので、使い方はいろいろ…。
- ひえ子カバー
  - ・ディスポの防水素材を使用し、結露を抑え、快適にご使用出来ます。




**注意点** ・電子レンジ加熱等のホットでのご使用はお止めください。・安全性の高いゲルを使用していますが、絶対に食べないでください。

## ひえ子カバーの方が本体の冷たさをダイレクトに伝えます!


※冷た過ぎると感じた際には、タオル等を使い、調整してご使用ください。

保冷データ [ひえ子カバー]

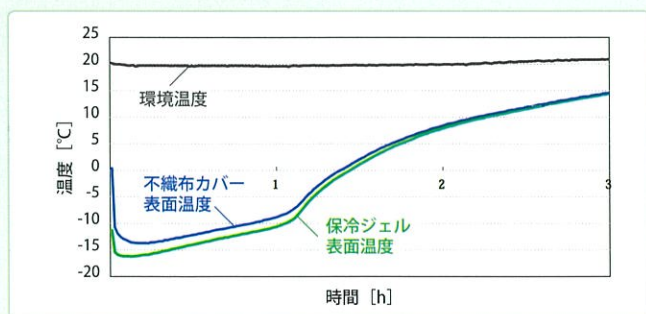


試験条件:

冷凍庫(約-20℃)で十分に冷やした保冷ジェルを不織布カバーに入れ、約20℃環境下にて静置させた時の温度変化を測定した。

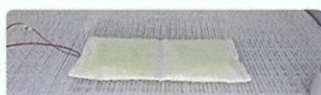


保冷データ [タオル]

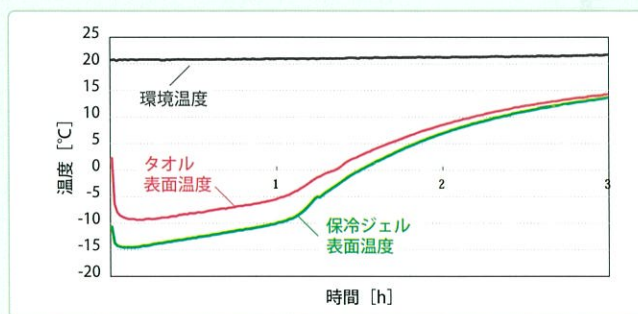


試験条件:

冷凍庫(約-20℃)で十分に冷やした保冷ジェルをタオルでくるみ、約21℃環境下にて静置させた時の温度変化を測定した。

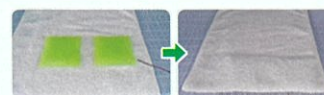

製品名/規格	材質	品番/JANコード	規格/包装	単位	ケース	定価/箱
ISK ひえ子/A	フィルム: ナイロンポリエチレン 内容物: 水、増粘剤 (CMC)、不凍液 (PG)、調整剤、食用色素、防腐剤	N8220 / JAN4517850001171	ひえ子 .....12個 ひえ子カバー-A...6枚	箱	5	¥4,300 (税別)
ISK ひえ子カバー/A	ラミ: ポリエチレン 不織布: レーヨン	N8230 / JAN4517850001188	50枚	箱	—	¥6,500 (税別)

※ひえ子カバー箱用フックにつきましては弊社営業にお問い合わせください。

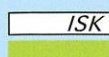

アイエスケー株式会社

本社 東京都文京区湯島4-9-12 〒113-0034 TEL.03-3812-0191 FAX.03-3812-9284  
 医療機器認可工場/東京都足立区東和3-5-4 〒120-0003 TEL.03-3620-1003  
 (URL) <http://www.isk-tokyo.co.jp/> (e-mail) [yes@isk-tokyo.co.jp](mailto:yes@isk-tokyo.co.jp)



ISO 9001:2008 認証取得